

移乗機能付ストレッチャー


ベッド

ストレッチャー


病院・施設設備

搬送に伴う乗せ換え作業に負担を軽減する移乗機能付ストレッチャー
(患者さんを持ち上げたりせず寝かせた状態で乗せ換えが可能)


■ベッドからストレッチャーへの乗せ換え

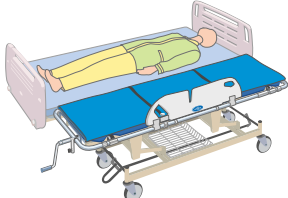

ストレッチャーをベッドに横付けし、高さを合わせます。必ず、ベッド・ストレッチャー共にストッパーが掛かっていることを確認してください。

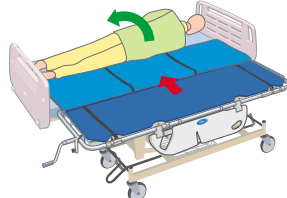

患者さんを横向きにし、ストレッチャーよりトランスファーマットレスを引き出し、体の下に差し入れます。

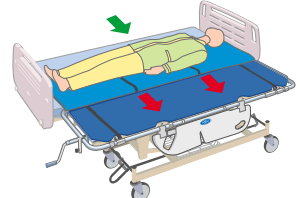

トランスファーマットレスの2本の紐を引っ張る(患者さんに近い部分(→)), または患者さんを軽く押すこと(→)によりトランスファーマットレスを滑らせ、患者さんをストレッチャーの中央部に移動させます。

- 患者の転落予防に配慮した幅117cm、高さ20cmの大型サイドレール
- ベッドとの橋渡しとなるトランスファーボードとしても使用可能
- ガードル架は頭側・脚側の2ヶ所装備
- 耐荷重150kg 緊急時には心肺蘇生も可能

トランスファーマットレス

搬送に伴う乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付



直進機能付き
(他の3輪は直進機能なし)

キャスター芯々1270mm



キャスター芯々495mm

NBST-215

税込価格 477,950円(本体価格 434,500円)

材質：フレーム部/スチール製 粉体塗装仕上げ
担架部・サイドレール/ポリプロピレン
マットレス/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ
キャスター：スチール製150mmトータルロック付
重量：約70kg
付属品：ガードル棒・ガードル受け金具(2ヶ所)・
ボンベ架(横型)・カゴ固定用ベルト(2本)

■寸法図(mm)

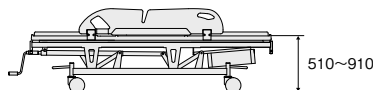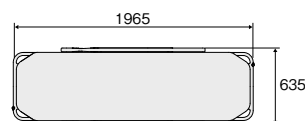

トータルロックキャスター

キャスターロック用ペダルは頭側と脚側にありどちらでも操作が可能

補充部品(キャスター)

品名	品番	価格
トータルロックキャスター 直進機能付き(1本)	95-NBST-TRL	オープン価格
トータルロックキャスター 直進機能なし(1本)	95-NBST-TR	オープン価格